

Istruzioni per la pulizia e la disinfezione - Da utilizzare per i sistemi TC, PET/TC, SPECT e SPECT/TC di GE Healthcare

Introduzione



La pulizia e la disinfezione sono azioni fondamentali per la manutenzione del sistema di imaging. Prima di procedere alla disinfezione, verificare visivamente che il dispositivo sia pulito, poiché eventuali residui di materiali inorganici o organici possono influire sulla riuscita della disinfezione.

Queste istruzioni per l'uso includono istruzioni generali per la pulizia e la disinfezione dei sistemi di imaging GE Healthcare, nonché istruzioni dettagliate per fascette in Velcro, fasce da polso, lettino/tavolo, pannelli di controllo/pulsanti del gantry e accessori. A seconda del dispositivo/della configurazione, alcune istruzioni dettagliate potrebbero non essere applicabili.

Le presenti istruzioni per l'uso fanno riferimento ai detergenti e ai disinfettanti approvati per il prodotto utilizzato.

A causa delle dimensioni dei dispositivi e della loro immobilità, non è possibile eseguire operazioni di pulizia e disinfezione automatiche. Gli utenti devono eseguire la pulizia manualmente.

Per informazioni sul produttore del sistema, fare riferimento alle istruzioni per l'utente o all'elenco dei produttori forniti con il sistema.

Detergenti/disinfettanti	
	Per la disinfezione, verificare il tempo di umidificazione/contatto specifico dell'agente. Assicurarsi che il dispositivo rimanga completamente bagnato/a contatto con l'agente per tutto il tempo previsto.
	Se un agente necessita di risciacquo, al termine del ciclo di pulizia e disinfezione sciacquare la parte con un panno privo di lanugine e acqua purificata, sterile a pH neutro (PURW). Prima del risciacquo, verificare che sia trascorso tutto il tempo di umidificazione/contatto previsto.

Detergenti/disinfettanti spray o liquidi

Se si utilizza un detergente o un disinfettante liquido o spray, applicarlo su un panno pulito e privo di lanugine da utilizzare come salvietta. Prima di iniziare la pulizia/disinfezione, verificare di avere a disposizione più panni.

Non spruzzare un detergente o un disinfettante direttamente sul sistema. Diversamente, è possibile danneggiare le parti del sistema.



Questa è una guida di riferimento per la pulizia e la disinfezione di un sistema di imaging e può essere utilizzata come materiale di formazione per il personale addetto alla pulizia. Per istruzioni dettagliate su pulizia e sicurezza, fare riferimento al Manuale dell'utente del sistema.

Istruzioni generali per la pulizia

Di seguito vengono fornite le istruzioni generali per la pulizia del sistema. Per le procedure dettagliate sulla pulizia di Velcro® e accessori, fare riferimento alle sezioni corrispondenti.


Pulizia: rimozione dello sporco



Indossare guanti nuovi.




Procurarsi gli agenti approvati.

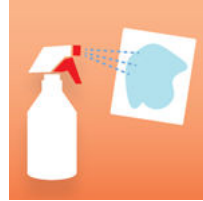


Se si utilizza un prodotto spray, spruzzarlo su un panno pulito privo di lanugine da usare come salvietta.



Pulire tutti i lati della parte, utilizzando tutte le salviette nuove necessarie per il completamento dell'operazione.

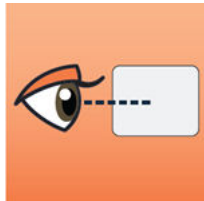

Verificare visivamente che il dispositivo sia pulito.

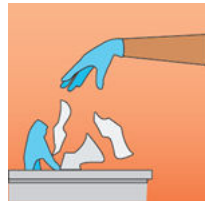


Gettare le salviette e i guanti usati.

Considerazioni speciali: scanalature, spazi e pulsanti



Avvolgere una salvietta intorno a una scheda di plastica o un tampone.

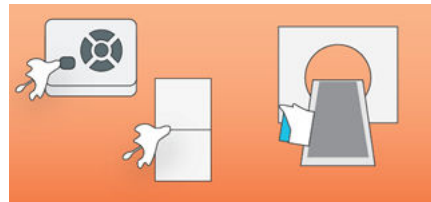

Appoggiare l'estremità o la punta su qualsiasi bordo, spazio o scanalatura, quindi trascinare delicatamente la salvietta avvolta. Utilizzare tutte le salviette nuove necessarie per completare la pulizia.


Istruzioni generali per la disinfezione

Di seguito vengono fornite le istruzioni generali per la disinfezione del sistema. Prima della disinfezione, verificare visivamente che il dispositivo sia pulito. Per le procedure dettagliate sulla pulizia di Velcro® e accessori, fare riferimento alle sezioni corrispondenti.


Disinfezione: eliminazione dei germi



Indossare guanti nuovi.

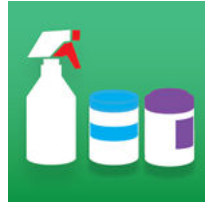

Procurarsi gli agenti approvati.

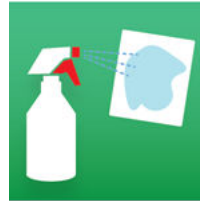


Se si utilizza un prodotto spray, spruzzarlo su un panno pulito privo di lanugine da usare come salvietta.



Pulire tutti i lati della parte, utilizzando tutte le salviette nuove necessarie.



Passare le salviette nuove sulla parte fino a bagnarla completamente.

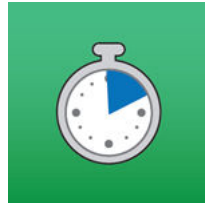


Verificare che il dispositivo rimanga bagnato per tutto il tempo di contatto previsto dall'agente.




Gettare le salviette e i guanti usati.

Considerazioni speciali: scanalature, spazi e pulsanti

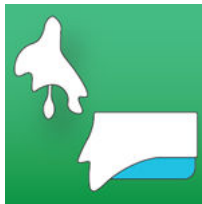

Avvolgere una salvietta intorno a una scheda di plastica o un tampone.

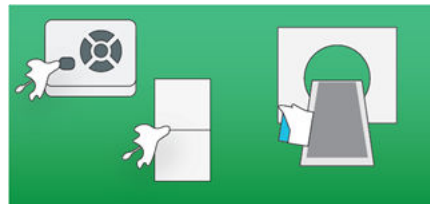

Appoggiare l'estremità o la punta su qualsiasi bordo, spazio o scanalatura, quindi trascinare delicatamente la salvietta avvolta. Utilizzare ogni volta salviette nuove.

Pulizia e disinfezione dei pannelli di controllo/pulsanti del gantry


Pulizia: rimozione dello sporco



Indossare guanti nuovi.




Procurarsi gli agenti approvati.

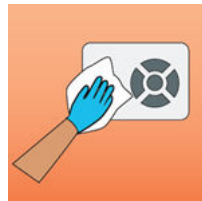


Pulire tutti i lati della parte, utilizzando tutte le salviette nuove necessarie per il completamento dell'operazione.



Avvolgere la salvietta su un tampone e/o una scheda di plastica.

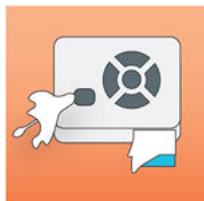

Posizionare il bordo negli spazi o nelle scanalature e trascinare delicatamente, secondo necessità.

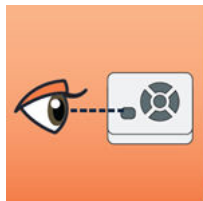


Verificare visivamente che il dispositivo sia pulito.



Gettare le salviette e i guanti usati.


Disinfezione: eliminazione dei germi

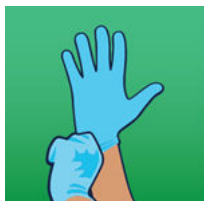

Indossare guanti nuovi.



Pulire tutti i lati della parte, utilizzando tutte le salviette nuove necessarie.

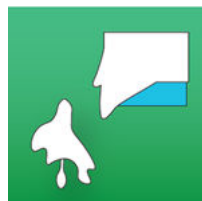


Avvolgere la salvietta su un tampone e/o una scheda di plastica.



Posizionare il bordo negli spazi o nelle scanalature e trascinare delicatamente, secondo necessità.



Passare le salviette nuove sulla parte fino a bagnarla completamente.

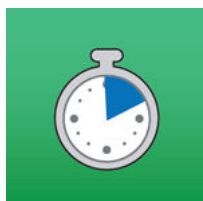

Verificare che il dispositivo rimanga bagnato per tutto il tempo di contatto previsto dall'agente.



Gettare le salviette e i guanti usati.

Pulizia e disinfezione del lettino/tavolo

Pulizia: rimozione dello sporco



Indossare guanti nuovi.



Procurarsi gli agenti appropriati.




Pulire tutti i lati della parte, utilizzando tutte le salviette nuove necessarie per il completamento dell'operazione.




Per scanalature, spazi e pulsanti: avvolgere la salvietta intorno a una scheda di plastica.



Posizionare il bordo negli spazi o nelle scanalature e trascinare delicatamente, secondo necessità.

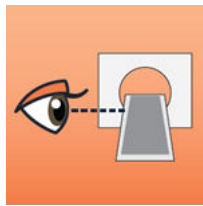

Verificare visivamente che il dispositivo sia pulito.

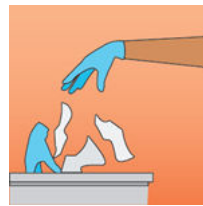


Gettare le salviette e i guanti usati.

Disinfezione: eliminazione dei germi




Indossare guanti nuovi.

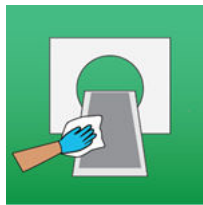


Pulire tutti i lati del tavolo, utilizzando tutte le salviette nuove necessarie.




Per scanalature, spazi e pulsanti: avvolgere la salvietta intorno a una scheda di plastica.

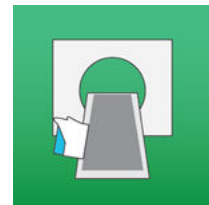

Pulire il tavolo bagnandolo accuratamente con le salviette nuove.

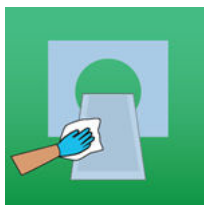

Passare le salviette nuove sul tavolo fino a bagnarlo completamente.

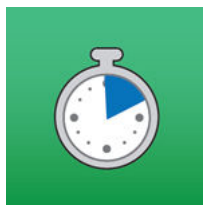

Verificare che il dispositivo rimanga bagnato per tutto il tempo di contatto previsto dall'agente.



Gettare le salviette e i guanti usati.

Pulizia e disinfezione degli accessori


Pulizia: rimozione dello sporco




Indossare guanti nuovi.



Procurarsi gli agenti approvati.

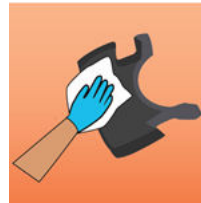

Pulire tutti i lati della parte, utilizzando tutte le salviette nuove necessarie per il completamento dell'operazione.

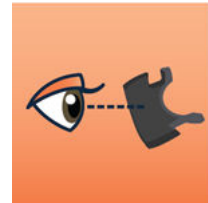

Verificare visivamente che il dispositivo sia pulito.




Gettare le salviette e i guanti usati.


Disinfezione: eliminazione dei germi




Indossare guanti nuovi.

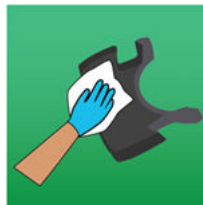

Pulire tutti i lati della parte, utilizzando tutte le salviette nuove necessarie.

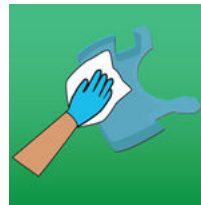

Passare le salviette nuove sulla parte fino a bagnarla completamente.

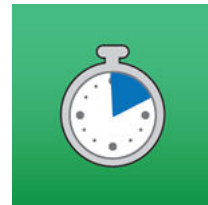

Verificare che il dispositivo rimanga bagnato per tutto il tempo di contatto previsto dall'agente.



Gettare le salviette e i guanti usati.

Pulizia e disinfezione delle fascette in Velcro®


Pulizia: rimozione dello sporco




Indossare guanti nuovi.




Procurarsi gli agenti appropriati.

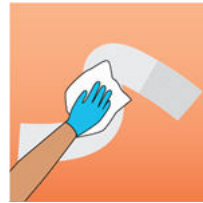


Pulire tutti i lati della parte, utilizzando tutte le salviette nuove necessarie per il completamento dell'operazione.

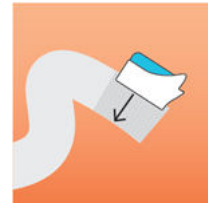


Avvolgere una salvietta intorno a una scheda, appoggiare il bordo della scheda sul Velcro® e premere.

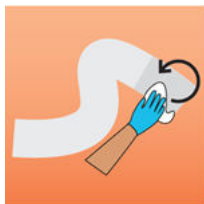


Piegare bene una salvietta strofinandola sul Velcro® con un movimento circolare.

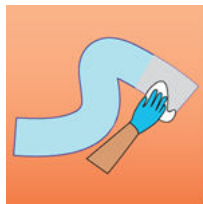

Sciacquare le fascette in Velcro® con acqua purificata (PURW).

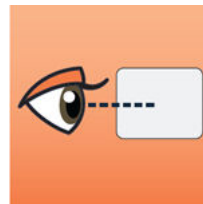

Verificare visivamente che il dispositivo sia pulito.

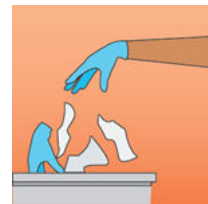

Gettare le salviette e i guanti usati.


Disinfezione: eliminazione dei germi




Indossare guanti nuovi.




Pulire tutti i lati della parte, utilizzando tutte le salviette nuove necessarie.

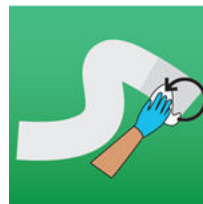

Piegare bene una salvietta strofinandola sul Velcro® con un movimento circolare.

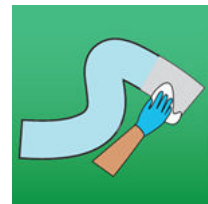

Pulire la fascetta bagnandola accuratamente con le salviette nuove.

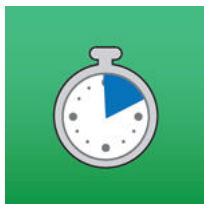

Verificare che il dispositivo rimanga bagnato per tutto il tempo di contatto previsto dall'agente.



Gettare le salviette e i guanti usati.

Pulizia e disinfezione delle fasce da polso


Pulizia: rimozione dello sporco




Indossare guanti nuovi.



Procurarsi gli agenti approvati.

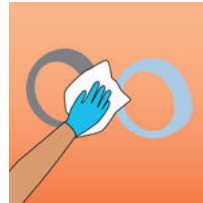


Pulire tutti i lati della parte, utilizzando tutte le salviette nuove necessarie per il completamento dell'operazione.

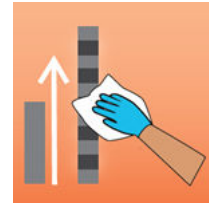


Estendere tutte le parti di collegamento e verificare visivamente che gli spazi siano puliti.



Strofinare i dentini/la chiusura della fascia da polso.

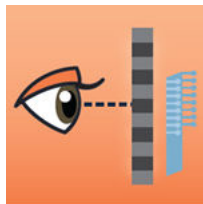

Verificare visivamente che il dispositivo sia pulito.

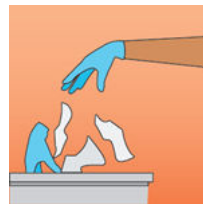


Gettare le salviette e i guanti usati.

Disinfezione: eliminazione dei germi




Indossare guanti nuovi.

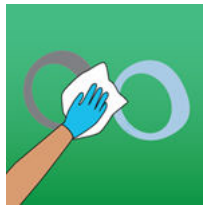


Pulire tutti i lati della parte, utilizzando tutte le salviette nuove necessarie.



Estendere tutte le parti di collegamento e verificare visivamente che gli spazi siano bagnati.

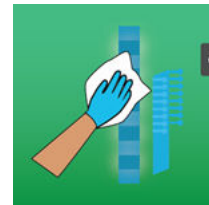

Pulire la fascia da polso bagnandola accuratamente con le salviette nuove.

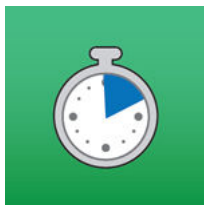

Verificare che il dispositivo rimanga bagnato per tutto il tempo di contatto previsto dall'agente.



Gettare le salviette e i guanti usati.

Cronologia delle revisioni

Revisione	Data	Motivo della modifica
1	Ottobre 2021	Versione iniziale
2	Maggio 2022	Aggiornamento

