

CULTURA[®] M

D deutsch
GB english
F français
I italiano
S svenska
NL nederlands

 **PRAXISDIENST**
Prodotti medici dal 1953
 **Ordina qui!**

CE



ISTRUZIONI PER L'USO

Componenti

- Interruttore centrale con spia di controllo
- Pulsante di regolazione della temperatura

Installazione dell'apparecchio

L'incubatore CULTURA può essere utilizzato in posizione orizzontale o verticale (con l'interruttore in alto).

Legenda

(vedi le foto sull'ultima pagina)

- L'incubatore CULTURA può essere utilizzato in posizione orizzontale o verticale (con l'interruttore in alto).
- Interruttore centrale con spia di controllo
- Pulsante di regolazione della temperatura

Messa in funzione

- Togliere l'apparecchio dall'imballaggio e introdurre la spina nella presa di corrente.
- Inserire il ripiano nei supporti e installare il termometro.
- Premere l'interruttore O/I. La spia centrale s'accende.
- Dopo circa 30 minuti verrà raggiunta la temperatura d'utilizzo prerogolata (ca. 35°C).

Regolazione della temperatura

La temperatura desiderata si ottiene girando il bottone di regolazione con un cacciavite. Per aumentare la temperatura, girare in senso orario, per diminuirla, girare in senso antiorario. Ad 15° di rotazione corrisponde ca. 1°C.

Istruzioni per l'uso

Accertarsi che lo sportello sia ben chiuso. Aprire lo sportello al massimo a 90°. Collocare il CULTURA in posizione tale da impedire l'esposizione diretta dello sportello in plexiglas ai raggi solari. Le provette in plastica non devono essere posate direttamente sul fondo. Si consiglia di utilizzare sempre il ripiano.

Pulizia

Il CULTURA resiste alla maggior parte dei prodotti per la pulizia e disinfezione in commercio. Importante: solventi come metanolo, acetone, ecc. sono assolutamente vietati per la pulizia dell'incubatore.

Anomalie tecniche

Per ragioni di sicurezza il CULTURA è munito di un dispositivo contro il surriscaldamento. Questo dispositivo non può essere rimpiazzato o riparato dal cliente. In caso di guasto o malfunzionamento contattare il fornitore di CULTURA.

Assistenza/Verifiche

Per la manutenzione non è necessaria nessuna assistenza. Devono essere eseguiti, tuttavia, controlli visivi regolari. Perciò dovrebbero essere controllati, i per via del deterioramento, il supporto ed il cavo elettrico ed eventualmente essere messi fuori servizio.

Oltre a ciò, la temperatura di funzionamento dovrebbe essere sempre controllata con il termometro ed, eventualmente, registrata.

DATI TECNICI

- Denominazione:**
CULTURA
- Articolo:**
70700 = 220-240 V
70701, 70713 = 100-120 V
70702, 70712 = 12 V
- Campo di temperatura:**
25-45°C
- Costanza/Precisione della temperatura:**
+/- 1°C
- Voltaggi disponibili:**
(si vedano le targhette)
220-240 V = 30 W
100-120 V = 30 W
12 V = 20 W
- Frequenza:**
50Hz / 60Hz
- Classe di protezione:**
Class II
- Telaio:**
PC & ABS senza PBDE
difficilmente infiammabile
- Sportello:**
PC, trasparente
- Termometro:**
da 60°C, nel tubo apposito
- Supporti:**
ABS
- Garanzia:**
2 anni dalla data dell'acquisto
- Dimensioni esterne:**
L x A x P:
310 x 155 x 168 mm
- Dimensioni interne:**
L x A x P:
220 x 120 x 150 mm
- Peso:**
1,1 kg

